

 **シンアツシン**

AC-210 取扱説明書

目次

1. ご確認ください	1
2. 使用上の注意	2
3. 使用目的 / 効能・効果	4
4. 形状・構造	4
5. 使用方法	5
5.1 使用前の準備	5
5.2 使用方法	6
5.3 使用后	7
6. 針の消毒	8
7. 針の調整	9
8. 仕様	10


■ このたびはシンアツシンをお買い上げいただきありがとうございます。

■ 本製品を正しく使用するためには、はじめにこの取扱説明書をお読みください。



1. ご確認ください

このたびはシンアツシンをお買い上げいただきありがとうございます。
お買い上げのシンアツシンの箱を開けましたら、まず下記のものが入っているかを確認してください。
不足品がございましたらお買い上げの販売店または弊社までご連絡いただくようお願い申し上げます。
付属品につきましては、当社製のものをご使用ください。

バイブレータ

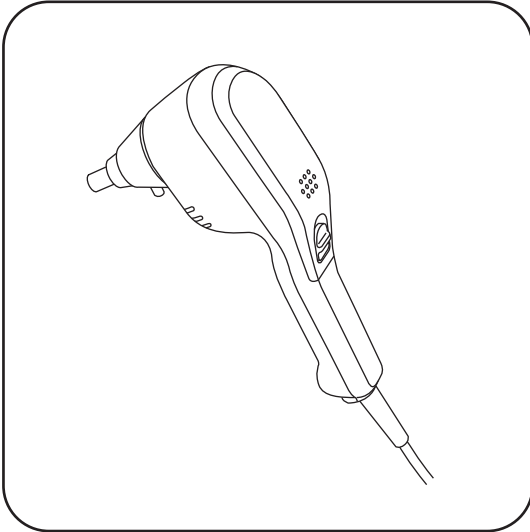

取扱説明書（本書） 保証書

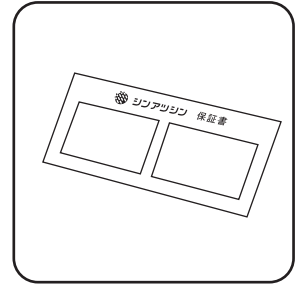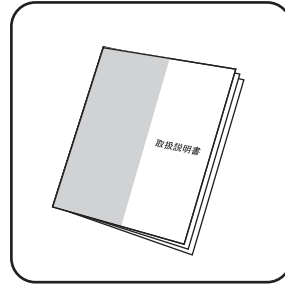

保証書には、販売店名、お買い上げ日などの記載が必要です。
これらの記載がない場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。

取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

2. 使用上の注意



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が想定される内容を示しています。



医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

眼球や口の中に直接当てないでください。



禁忌・禁止

次の人は、ご使用前に医師に相談してください。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- ・悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
- ・心臓に障害のある人。
- ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人。
- ・皮膚に創傷のある人。
- ・安静を必要とする人。
- ・体温38℃以上（有熱期）の人。
- ・骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、急性とう（疼）痛性疾患の人。
- ・捻挫、肉離れなど炎症性のある人。
- ・背骨（脊椎）に異常のある人、又は背骨が左右に曲がっている人。
- ・その他、医療機関で治療中の人。

注意

使用上の注意

- ・頭部に使用しないでください。
- ・使用しても効果が現れない場合、医師/専門家又はサービスセンターに相談してください。
- ・浴室などの湿度の高いところで使用しないでください。
- ・自動車の運転をしながら使用しないでください。
- ・泥酔時には使用しないでください。
- ・体質に合わない人、金属アレルギーの人は使用しないでください。

1. 使用前の注意事項

- ・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- ・交流100V以外で使用しないでください。
- ・すべてのコードは容易に離脱しないように、正しく確実に接続してください。
- ・使用開始から1週間は、1回の使用時間を15分以内にしてください。
- ・バイプレータ本体、ホルダー、電源コード、スリーブ及び針の損傷がないか、正常に作動するか確認してください。
- ・しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器が正常に、かつ安全に作動することを確認してください。
- ・他の医療機器と同時に使用しないでください。

2. 使用中の注意事項

- ・治療目的以外の用途で使用しないでください。
- ・機器に故障が発見された場合には使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
- ・使用時間は30分を超えないようにしてください。
- ・身体に異常を感じた時は使用を直ちに中止してください。
- ・停電の時は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

3. 使用后及び保管時の注意事項

- ・コード類を取り外す時は、コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- ・針先や筒先、機器本体、付属品などは、次回の使用に支障の無いよう清浄し、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- ・長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ・コード類をキズ付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。

4. 保守・点検に関わる事項


- ・常に使用前後の点検を励行し、機器の故障又は異常が認められた場合には、販売店又は製造販売元に連絡してください。
- ・電源コードが破損した場合には、ご自身で交換しないようにしてください。販売店又は製造販売元に連絡してください。
- ・分解や修理、改造等加工は一切行わないでください。

3. 使用目的 / 効能・効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する事。

- ① 疲労回復
- ② 血行をよくする
- ③ 筋肉の疲れをとる
- ④ 筋肉のこりをほぐす
- ⑤ 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

4. 形状と構造

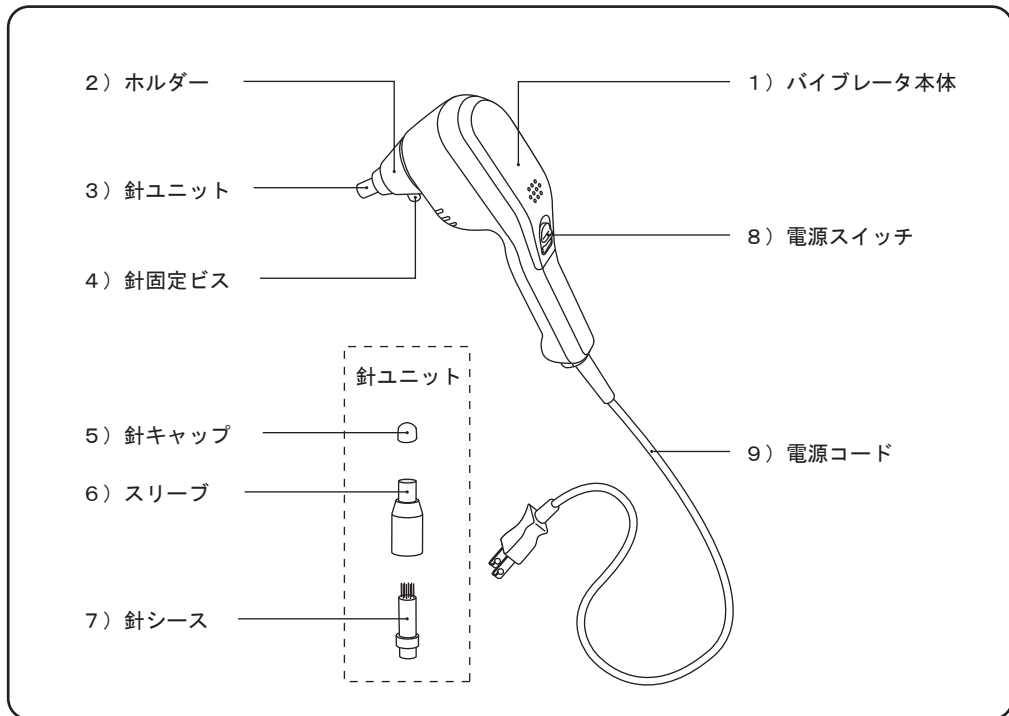

各部の名称とはたらき


- 1) バイブレータ本体 : 針を振動させる装置です。
- 2) ホルダー : バイブレータ本体に針ユニット部分を固定します。
- 3) 針ユニット : 針シース・スリーブ・針キャップ等、複数の部品で構成されています。
- 4) 針固定ビス : 針ユニットをホルダーに固定したりはずす時に使います。
- 5) 針キャップ : 使用しない時、スリーブに被せて針の汚れを防ぎます。
- 6) スリーブ : 針が皮膚に強く当たることを防ぎます。また針を保護します。
- 7) 針シース : 12本の針が付いています。
- 8) 電源スイッチ : 電源の「入」「切」のためのスイッチです。
- 9) 電源コード : 100Vのコンセントから電源を供給します。

5. 使用方法

5. 1 使用前の準備

- ① スリーブを押し込んで、針が正しい位置（左下図）にあるか確認します。針が出すぎたり、引っ込み過ぎている場合は、調整します。


（9ページの「針調整の手順」参照）

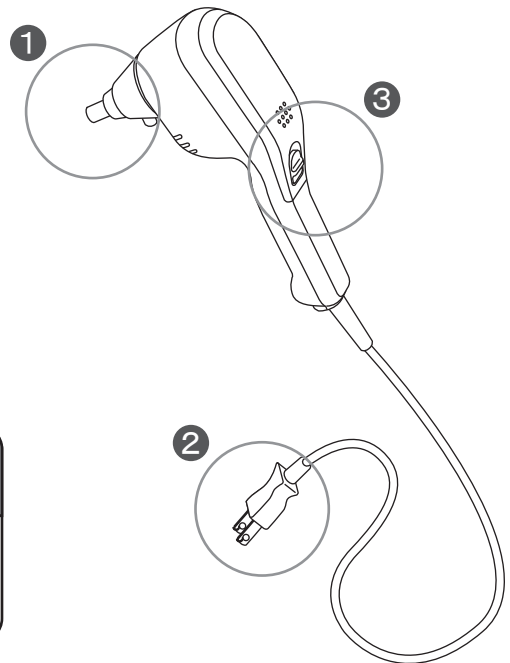


⚠ 注意

針を出しすぎると、皮膚を傷つける恐れがあります。

- ② 「電源コード」のプラグを100Vのコンセントに差し込みます。

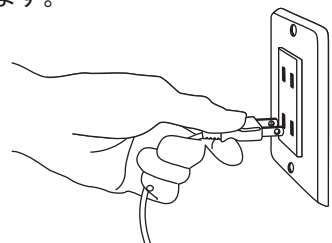


- ③ 「電源スイッチ」を「入」にするとバイブレータが作動します。

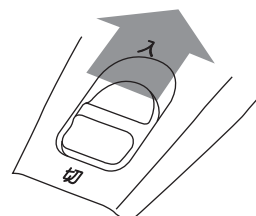

5. 2 使用方法

- ① 針ユニットのスリーブにかぶせてある針キャップを外します。

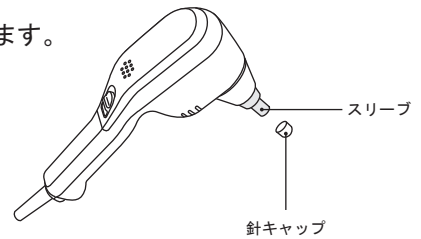

- ② 針を保護しているスリーブを凝りや痛みのある場所に垂直に押し当てて使用します。

■ シンアツシンを当てる場所

シンアツシンは凝ったり痛みのある場所に直接押し当てます。12本の針が同時に動き、万遍なく肌表面を刺激するため、従来の針治療のように「ツボ」を探す必要はありません。



■ シンアツシンを当てる時間

シンアツシンを押し当てる時間は、

1ヶ所に10～15秒

最初は時計を見ながら「10秒」という時間を覚えましょう。

- ③ 時間が来たら、シンアツシンを肌表面から離し、周辺に移動させるという動作を繰り返します。

■ シンアツシンを押し付ける強さ

痛いのを我慢してシンアツシンを押し付ける必要はありません。気持ちいいと感じる程度に押し当ててください。肌表面に針の痕跡がかすかに残る程度にします。

■ シンアツシン サービスセンター

もっと詳しい使用方法や自分の症状に合わせた使用方法を知りたいときは「シンアツシン サービスセンター」（10ページ参照）までお電話にてご相談ください。専門の指導員が対応いたします。

注意

シンアツシンの使用を開始して1週間は、1回の使用を15分以内にしましょう。
1日に数回の使用は差し支えありません。シンアツシンの刺激が身体に慣れてきたら、
少しずつ使用時間を延ばしていきましょう。

※1回の使用時間は30分を超えないようにしましょう。

5. 3 使用後


使用が終わったら、電源スイッチを「切」にして、電源コードをコンセントからはずし、清潔にして保管しておきましょう。電源コードがよじれている時は、ほどいて保管しましょう。断線の原因となります。

■ もみ返し

人によっては使用後に痛みを感じたり、身体がだるくなる場合がありますが、これはいわゆる「もみ返し」といい、身体に急速な変化が起こっています。
しばらくの間、使用を中止してください。

6. 針の消毒

脱脂綿に消毒用アルコール（市販のエタノール等）をしみこませ、シンアツシンの針ユニットのスリーブを数回押し付けて消毒をします。

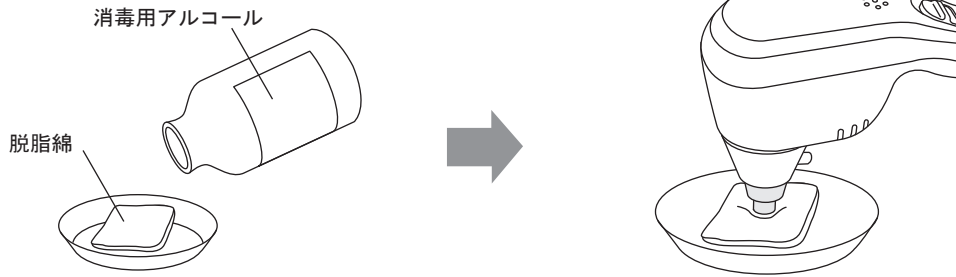


針先や針の奥がひどく汚れてきたら、針ユニットを取り外して下記の手順で掃除しましょう。

針ユニットの掃除手順


- ① 針固定ビスを左（時計と反対方向）に回して、スリーブ部分を引っ張ると針ユニットが外れます。




- ② 針ユニット下のネジ部を、コインなどで左（時計と反対方向）に回すと針シースが外れます。

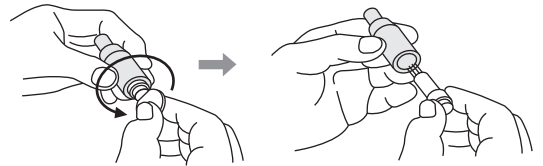


- ③ 消毒用アルコールを浸した脱脂綿や歯ブラシなどで針シースを掃除します。

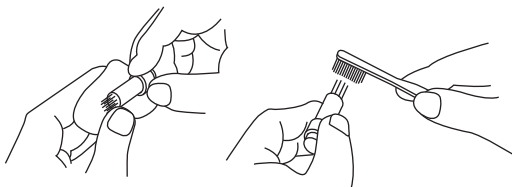

- ④ 掃除の終わった針シースをもとに戻し、右（時計方向）に回します。

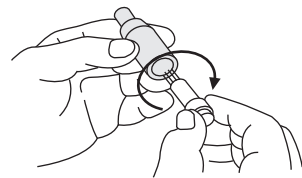

- ⑤ 針ユニットをホルダーに差込み、針固定ビスを右に回してしっかりと留めます。

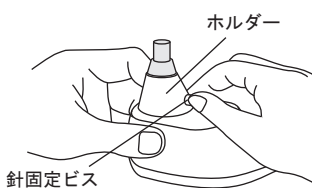


7. 針の調整

製品出荷時に針は適度に調整しておりますので、最初に調整する必要はありません。
消毒をした場合など、不都合が出てた場合に針の調整をしてください。

針調整の手順

- ① 8ページの「針ユニットの掃除手順」①と同様に、針ユニットをバイブレータ本体からはずします。

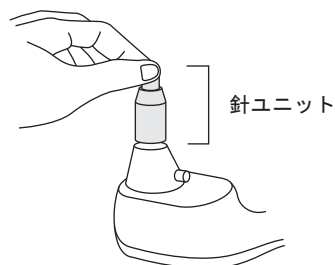


- ② スリーブの先を押して、針先端の出加減を確かめます。



- ③ 針の下部のネジを、コインなどを使って回します。
右（時計方向）に回すと、針が出ます。
左（時計と反対方向）に回すと、針が引っ込みます。
スリーブを押した状態で先端が針の高さと同じになる位置でとめます。
（5ページの①を参照）

針ユニットのスリーブ

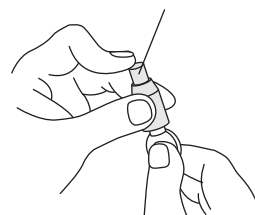

- ④ 8ページの「針ユニットの掃除手順」⑤と同様に、針ユニットをホルダーに固定します。

8. 仕様

製品名	シニアツシンAC-210
医療機器認証番号	第224AFBZX00090000号
分類	指定管理医療機器
類別	機械器具77 バイブレーター
一般的名称	針付バイブレーター
	定格電圧 100V
	定格消費電力 6/5W
	定格周波数 50/60Hz
	定格時間 30分
振動数	3000回/1分間(50Hz)
	3600回/1分間(60Hz)
重さ	0.9kg
バイブレータの大きさ	L 208×W 129×H 62 (mm)

■ 廃棄について

装置を廃棄する場合は、お住まいの自治体の廃棄方法に従ってください。

■ 修理サービスについて

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店またはコノコ医療電機株式会社にご持参、あるいはご送付ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。

コノコ医療電機株式会社 修理サービス係

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル
電話 03-3787-3332 F A X 03-3784-7727

相談窓口

シニアツシン サービスセンター

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル

 **0120-800-515**

受付時間：月～金 9：00～18：00

製造販売元

コノコ医療電機株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麴町4-5-20

電話 03-3787-3332 F A X 03-3784-7727